




Attends-produktene er testet og godkjent for god hudomsorg av proDERM, institutt for dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland



Personer som har behov for inkontinensprodukter bruker dem ofte 24 timer i døgnet. Dette betyr at huden til stadighet er i kontakt med produktoverflaten. Det er derfor svært viktig å velge hudvennlige materialer. Dersom inkontinensproduktet i tillegg gjør huden fuktig, noe som kan forårsake hudirritasjoner eller skader på huden, kan dette igjen føre til stort ubehag for brukeren, og kanskje også økte kostnader for helsevesenet.


proDERM har testet hudtoleransen og effekten som Attends inkontinensprodukter har på huden på følgende tre måter:

1. Tester med tørt materiale

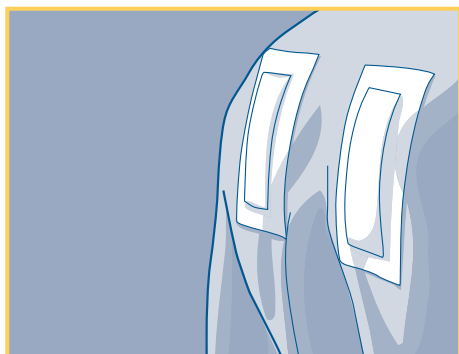

Mindre deler (av et tørt produkt eller materiale som er i kontakt med huden) blir festet på personens rygg i 3 x 24 timer for daglig visuell dermatologisk gradering av mulige hudreaksjoner, og vurdert av proDERM etter en skala.

2. Tester med fuktig materiale

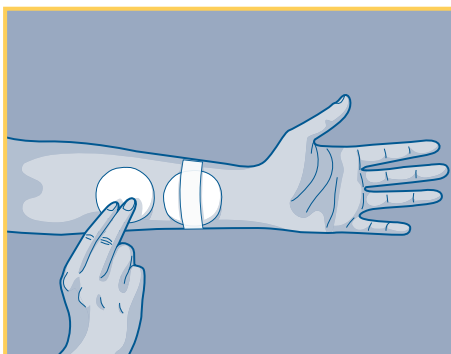

Deler av et fuktig Attends- produkt med syntetisk urin festes til en testperson for 3 x 24 timer. Effekten på huden blir visuelt evaluert og vurdert av proDERM i kombinasjon med TEWL* målinger. Vær oppmerksom på at produktets fuktighet reflekterer "rewetresultatene"*** som vi bruker for å måle ytelsen til våre produkter for slik å simulere virkeligheten.

3. Brukerevalueringstester



> 200 brukere av Attends inkontinensprodukter, i et institusjonsmiljø, deltok i en brukerevaluering over en 4-ukers periode. Effekten på huden ble overvåket av klinisk helsepersonell, og visuelt evaluert og vurdert ved bruk av et anerkjent vurderingsverktøy utviklet spesielt for hud.

Det er ikke nødvendig at alle produkter gjennomgår de tre testene, da noen produkter har likt materiale og kjerneteknologi. Det betyr at et testresultat kan bli brukt for flere produkter. Alle eksklusive materialer må som et minimum gjennom en test med tørt materiale.

* Transepidermal Water Loss: et verktøy som måler hudens væsketap, noe som er et tegn på forverret hudtilstand.

** Rewet test; måler mengden væske som returnerer til bleiens overflate (under press) etter en urintømming.

Konklusjon

Kjerneteknologien i Attends inkontinensprodukter gir en utmerket lekkasjesikkerhet og tørrhet mot huden for brukeren. Resultatene fra proDERM-testene (tester med tørt og vått materiale samt brukerevaluering), viser at Attends-produktene holder en høy standard med tanke på god hudomsorg.

Dette er årsaken til at proDERM har godkjent at Attends kan bruke kvalitetsstempleet på sine produkter*



* Produkter som er testet/godkjent: Slip Regular, Slip Active, Flex, Pull-Ons, Contours, Soft, Cover-Dri og Adjustable.

Vi må gjøre oss fortjent til kvalitetsstempleet hver dag...

Hver dag forlater 25 lastebiler, fullastede med inkontinensprodukter, Attends-fabrikken i Aneby i Sverige, for levering til kunder over hele Europa. For å sikre vår høye kvalitetsstandard, følger vi opp hver eneste produktreklamasjon som rapporteres til oss. Alle reklamasjoner relatert til hudomsorg, er vi kontraktsforpliktet til å dele med proDERM. Dette skaper full åpenhet mellom Attends og proDERM. Dersom det skulle oppstå en økning i hudrelaterte reklamasjoner for en spesifikk produktkategori, forventer proDERM en grundig oppfølging og korrigerende av problemet.

Vi kan med stolthet informere om at fra kontraktstart mellom Attends og proDERM (juni 2010), har det ikke vært nødvendig med korrigerende tiltak.

Referanser:

- proDERM, Institute for Applied Dermatological Research
Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hamburg, Germany.
www.proderm.de
- proDERM Study numbers 09.0363-99, 10.0240-99, 10,0239-06, 11.0427-02, 11-0489-11, 14.0062.02, 15.0022-02,
October 2009 - January 2016.
- In-use Evaluation reports Attends Healthcare, August 2010, February 2012 and June 2014.

All dokumentasjon (rapporter, sertifikater, protokoller, teststudieresultater o.l.) er tilgjengelig ved forespørsel.
Dato for siste revisjon: **Maj 2016**