
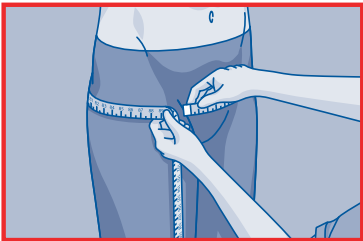



# Attends® Pull-Ons

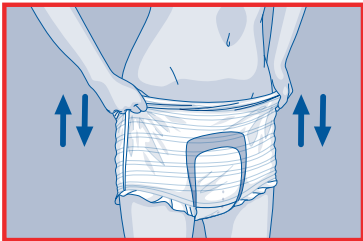


## Brukerveiledning

- 1**  **Forberedelse**

Mål hofte og livvidde og velg det største målet for å finne riktig størrelse.
- 2**  **Fiksering**

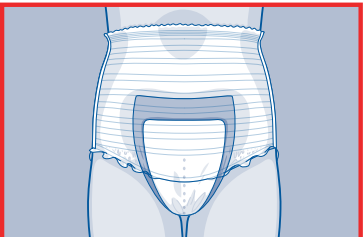Attends Pull-Ons kan brukes som vanlig undertøy, og bleiebuksen er enkel å dra opp og ned.
- 3**  **Passform**

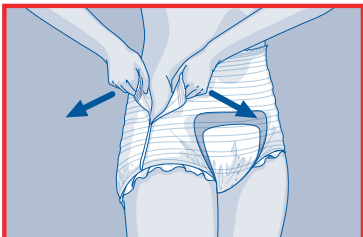Elastisiteten i bleiebuksen gir en god og komfortabel passform, og det pustende materialet bidrar til god hudomsorg.
- 4**  **Skifte**

Det er enkelt både å ta av og skifte bleiebuksen. Man kan enten dra bleiebuksen ned eller rive den opp i sidene.

## Tips og råd

### Utvalg

- Velg riktig størrelse på Pull-Ons ved å måle hoftemål og livvidde. Velg det største målet for riktig størrelse.
- Velg absorpsjonsnivå ut fra mengden urin. For best mulig komfort og diskresjon bør man starte med et lavt nummer på absorpsjonsskalaen, før man bytter til et produkt med høyere absorpsjonsnivå.
- Pull-Ons er et godt alternativ for brukere som drar av seg kroppsformede bleier.

### Fiksering

- Kontroller at bleiebuksen er fiksert riktig vei.

### Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Dersom våtindikatoren har forsvunnet til mer enn halvparten (60%) av bleiens lengde bør man bytte. Hvis ikke kan produktet brukes lenger.

### Avfallshåndtering

- Rull bleiebuksen sammen og kast i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i toalettet.

For mer informasjon, besøk [www.attends.no](http://www.attends.no)